



IBOR
ortopedia

Plantillas fisiológicas

Consejos para su uso y
mantenimiento

IBOR
ortopedia

Zaragoza 9, HUESCA 974 220 678

Martinez de Velasco 36, HUESCA 974 245 677

Diputación 12, BARBASTRO 974 313 715

San Juan de la Cruz 22, ZARAGOZA 976 358 162



Finalidad terapéutica:

El reparto de presiones para aliviar las zonas sobrecargadas o dolorosas y la sustentación de los arcos fisiológicos del pie proporcionando un aumento del confort, la funcionalidad y el rendimiento deportivo.

Descripción del producto:

Las plantillas fisiológicas están fabricadas en un material blando pero consistente, ligero y muy agradable al contacto con la piel: EVA (etil-vinilo-acetato); utilizando tecnología CAD/CAM, a partir de la digitalización de la huella en 3D y de un detallado estudio de la marcha y la carrera.

Consejos para su uso:

Las plantillas deben usarse con un calzado adecuado, amplio y con un contrafuerte resistente. Si no encajan bien en su calzado habitual, no las recorte, acuda a nuestro gabinete para su adaptación.

La sensación al usarlas debe ser de confort, remitiendo las molestias y el cansancio y mejorando el rendimiento deportivo.

La adaptación a las plantillas suele ser espontánea, aunque se recomienda un uso progresivo los primeros días, utilizándolas a tiempo parcial.

Si no se habitúa a su uso de al cabo de varios días; deje de usarlas y acuda a nuestro gabinete. Le agradeceremos que reserve su cita previamente por teléfono.

Mantenimiento y cuidados:

Lavarlas regularmente con agua y jabón y secarlas con una toalla, evitando fuentes de calor (estufas o secadores) que podrían deformarlas.

Muchas gracias por confiar en nosotros, queremos garantizar su absoluta satisfacción.